

DaysyView 2.0


Update and Synchronisation

1




Aggiorna DaysyView nello store del tuo sistema operativo.

2

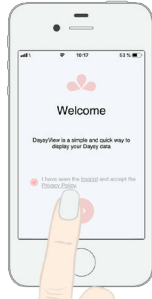


Accetta la „privacy policy“ e clicca sulla freccia per proseguire con lo step successivo.

3

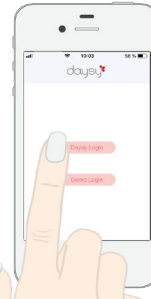

Seleziona „Daysy-Login“. „Demo-Login“ è solo di esempio.

4

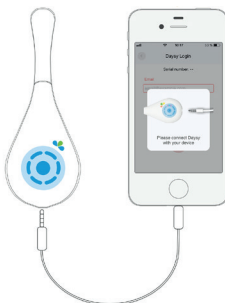


Connetti Daysy al telefono in modo che DaysyView possa rilevare il numero di serie.

5




Inserisci e conferma la tua email. Ti arriverà un codice di 5 cifre.

6

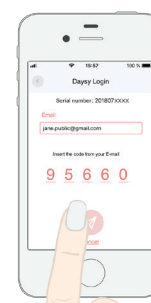

Inserisci il codice arrivato via email e conferma i dettagli.

7

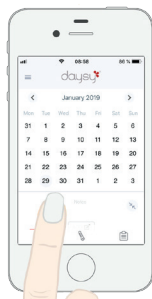


L'update è completato quando appare il calendario vuoto. Puoi iniziare la sincronizzazione.

8



Connetti Daysy al telefono e accendila. La sincronizzazione inizia automaticamente. Sii paziente. Se Daysy si spegne, accendila di nuovo.

9

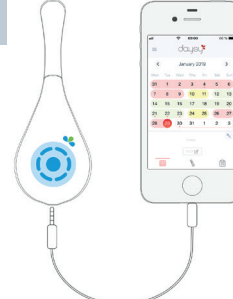

Se il giorno corrente è colorato, puoi disconnettere il cavo. Assicurati che Daysy sia accesa.